

DERMAPLIQ[®] Spray



Date de création : 22-09-2023

Date de mise à jour : 21-09-2020

Informations produit

Fonction du produit

Chez les chiens, chats, chevaux et NAC : apport local de substitut de matrice extracellulaire.

Caractéristiques

Produit d'hygiène à usage externe pour animaux ; substitut de matrice extracellulaire.

Les polymères de carboxyméthylglucose sulfate (RGTA = *ReGeneraTing Agents*) sont des biopolymères de structure proche des héparanes sulfate. Ils favorisent la régénération naturelle de la peau.

Solution stérile à usage externe.

Composition par ordre décroissant

Composants :

RGTA (polymères de carboxyméthylglucose sulfate) 750 µg

Excipients QSP 7,5 mL

Mode d'emploi

Usage externe.

- 1- Nettoyer la zone concernée.
- 2- Pulvériser DERMAPLIQ[®] Spray en tenant le flacon à environ 5 cm de la zone.
- 3- Laisser agir au moins 5 minutes avant l'application d'un traitement médicamenteux éventuel ou la pose d'un pansement.

DERMAPLIQ[®] Spray agit sur du tissu vivant.

Répéter l'application tous les 2 à 3 jours en fonction de l'évolution. Il est déconseillé d'utiliser le produit quotidiennement. La durée d'utilisation peut varier d'une à plusieurs semaines.

Votre vétérinaire peut être amené à adapter le mode d'emploi proposé. Bien suivre ses recommandations.

Un flacon de 7,5 mL permet environ 50 pulvérisations.

Le système 3K[®] de la pompe empêche l'entrée de germes ou d'impuretés à l'intérieur du flacon.

Précautions d'emploi

Conserver le produit dans son emballage d'origine à une température inférieure à 25°C.

DERMAPLIQ[®] Spray ne contient pas de conservateur.

Utiliser le produit dans le mois qui suit la première pulvérisation.

Exploitant agréement

Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE

Présentations

Présentation et quantité

DERMAPLIQ[®] Spray Boîte de 1 flacon pulvérisateur de 7,5 mL de solution stérile
Code GTIN : 03700454502224

Exploitant agrément

Laboratoire TVM
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
FRANCE

Laboratoire



TVM FRANCE
57 rue des Bardines
63370 LEMPDES
Tél : 04.73.61.72.27
Service clients TVM :
service.clients@tvm.fr - 04.73.61.75.76
<http://www.tvm.fr>