

ISTOGEL



Date de création : 05-02-2023

Date de mise à jour : 17-03-2021

Informations produit

Fonction du produit

Gynécologie-obstétrique.

- Protection des mains de l'opérateur lors des interventions gynécologiques ou des manœuvres obstétricales (mise-bas, rétention placentaire).
- Lubrification du rectum (fouille ou toucher).
- Protection des premières voies génitales de la femelle lors de l'examen gynécologique ou lors de la mise-bas.
- Effet lubrifiant favorisant l'expulsion du nouveau-né.

Échographie.

- Conduction des ultrasons dans les diverses applications de l'échographie (médicales, gynécologiques, cardiologiques...).

Examen.

- Lubrification des sondes endoscopiques ou des sondes trachéales, œsophagiennes et urétrales.

Caractéristiques

Lubrifiant grâce à sa haute viscosité, ISTOGEL est également miscible dans l'eau et non gras. Ce gel ne tache pas les vêtements.

ISTOGEL est utilisé comme protecteur cutané en gynécologie et en obstétrique. Il permet de lubrifier le tractus génital ainsi que les instruments gynécologiques. Par ailleurs, ses propriétés conductrices des ultrasons permettent d'obtenir des images nettes sans artéfact sonde-peau. De plus, ISTOGEL n'altère pas les sondes même si du gel reste sur les joints de silicone après usage.

Composition par ordre décroissant

Gel lubrifiant.

Gel aqueux parfumé de sorbitol et de polysaccharides extraits d'algues marines.

Mode d'emploi

Usage externe.

Mise en fonction de la pompe :

- pour déverrouiller la pompe, tenir la bague avec la main gauche et tourner le poussoir avec la main droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- après utilisation et pour éviter toute fuite pendant le transport, il est possible de bloquer la pompe lors de la dernière pression en tournant le poussoir dans le sens des aiguilles d'une montre.

Gynécologie-obstétrique.

Avant d'intervenir, il suffit à l'opérateur d'enduire d'une fine couche d'ISTOGEL ses mains, ses bras et ses instruments.

Diluer dans 4 à 5 fois son volume d'eau tiède pour obtenir des eaux fœtales artificielles.

Échographie.

Une petite quantité d'ISTOGEL suffit pour assurer de bonnes conditions d'examen.

Précautions d'emploi

ISTOGEL est destiné à un usage vétérinaire.

En cas d'application sur la peau ou le pelage, il est recommandé de ne pas laisser sécher le gel à la fin de l'examen, mais de l'enlever avec une compresse humide pour éviter le dessèchement sur la peau ou l'agglutination des poils.

Ne pas mettre en contact avec la semence.

Ne pas faire avaler.

Tenir hors de la vue et portée des enfants.

Présentations

Présentation et quantité

ISTOGEL Flaçon de 1 100 g avec pompe doseuse

Code GTIN : 03660144115977

Laboratoire



DOPHARMA France S.A.S
DOPHARMA France S.A.S
23, Rue du Prieuré - Saint-Herblon
44150 VAIR SUR LOIRE
FRANCE
Tél : 02 40 98 02 16
Fax : 02 40 98 03 99