

# SCHIRMER TEAR TEST

Date de création : 15-08-2022

Date de mise à jour : 15-08-2022

## Informations produit

---

### Caracteristiques

Bandelettes stériles conditionnées par paires, sous sachets individuels.

Chaque bandelette, marquée R (œil droit) ou L (œil gauche), est millimétrée (5 à 35 mm) et se colore en bleu par humidification de la bandelette pour faciliter la lecture du test.

Produit de diagnostic en ophtalmologie vétérinaire.

### Utilisation

Chez les chiens et les chats :

- test d'évaluation de la phase aqueuse de la sécrétion lacrymale.

### Mode d'emploi

Usage oculaire.

Chiens, chats :

plier la bandelette au niveau de l'encoche et placer l'extrémité pliée dans le cul-de-sac conjonctival, entre la paupière inférieure et la cornée, à sa jonction tiers moyen - tiers temporal.

Retirer la bandelette après une minute et mesurer immédiatement la longueur d'humidification.

La lecture immédiate est un élément important, car comme pour toute bandelette de test de Schirmer, l'humidification continue à progresser de quelques millimètres après le retrait de l'œil.

La coloration en bleu pour des valeurs supérieures à 5 mm, la graduation en millimètres et le repère œil droit/œil gauche imprimés sur chaque bandelette facilitent la mesure.

Interprétation chez le chien à titre indicatif :

- longueur ? 9 mm/min : valeurs faibles (déficit lacrymal).

- longueur 10 à 14 mm/min : valeurs intermédiaires (à confirmer par la clinique ou par un test ultérieur).

- longueur ? 15 mm/min : valeurs normales.

### Précautions d'emploi

Le test doit impérativement être réalisé avant tout nettoyage de l'œil, instillation de topique ou manipulation sur les paupières.

## Présentations

---

### Présentation et quantité

Boîte de 10 pochettes de 5 sachets de 2 bandelettes

Code GTIN : 00844505005920

### Laboratoire



MSD Santé Animale  
Rue Olivier de Serres  
B.P. 17144  
49071 BEAUCOUZE CEDEX  
Tél : 02.41.22.83.83  
Fax : 02.41.22.83.00  
<http://www.msd-sante-animale.fr>